



Ako používať ScanBox^{pro}

6 / Dvojitým klepnutím na obrazovku spustíte skenovanie.



ÁNO

Robte široké pohyby. Pri skenovaní by mal byť váš pohyb široký – od ucha k uchu, aby ste zaistili skenovanie všetkých zubov, vrátane zadných zubov.

Udržujte svoje pohyby v strede. Pohybovať by sa mal iba váš ScanBox^{PRO} a mobil, nie vaša hlava.

Sledujte rýchlosť meradla na obrazovke vášho smartfónu.

NIE

Nenechávajte jazyk pred zubami. Nevydychujte prudko s otvorenými ústami, aby ste predišli zahmlievaniu objektívu fotoaparátu.



7 / Pozorne počúvajte pokyny aplikácie.

Ako dodatočné skenovanie môžu byť požadované nasledujúce polohy:



Ústa mierne otvorené

To znamená, že medzi hornými a dolnými zubami necháte priestor zhruba ako prst.



Ústa zatvorené

To znamená, zahryznúť, ale pery držať od seba, aby boli viditeľné horné a dolné zuby.



Ústa doširoka otvorené

To znamená, že otvorte ústa tak široko, ako môžete, bez uvoľnenia trubice na retrakciu líc.



Nájdite si čas na kontrolu svojich skenov. Ak vaše obrázky nespĺňajú pokyny na obrazovke, môžete ich znova nasnímať. Po overení všetkých vašich fotografií môžete odoslať váš sken.

4/ Vložte trubicu na retrakciu líc do držiaka na telefón.

ÁNO

Prípojte trubicu na retrakciu líc na držiak na telefón. Keď je správne pripevnená, budete počuť cvaknutie.

NIE

Neskúšajte použiť viac ako jednu trubicu na retrakciu líc.

Neskúšajte pripojiť nesprávny koniec trubice na retrakciu k držiaku na telefón.



5/ Vložte trubicu na retrakciu líc do úst.



ÁNO

Vložte trubicu na retrakciu líc do úst, najskôr jednu stranu, potom druhú. Vaše zuby a ďasná by mali byť úplne viditeľné bez akéhokoľvek nepohodlia.




NIE

Nehryzte do trubice na retrakciu líc. Trubica by mala držať vaše pery od zubov.

Nenechávajte trubicu na retrakciu líc mimo úst. Pred skenovaním musíte vložiť trubicu na retrakciu líc.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa DentalMonitoring alebo procesu skenovania, kontaktujte svojho lekára alebo tím prostredníctvom aplikácie DentalMonitoring. Presne vedia, v akom stave je vaša prebiehajúca liečba. V prípade akýchkoľvek technických otázok o aplikácii je vám k dispozícii tím podpory DentalMonitoring. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom tejto e-mailovej adresy: support@dental-monitoring.com

1 / Spustite si aplikáciu DM.

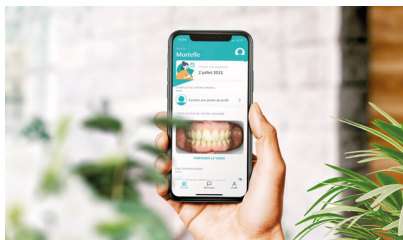

Pred každým skenovaním si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou.

Postavte sa pred zrkadlo, spustíte aplikáciu DM a skontrolujte, či je zapnutý zvuk telefónu.

2 / Použite trubicu na retrakciu prispôbenú vašim ústam.

ÁNO

Vždy používajte trubicu na retrakciu, ktorá je prispôbená veľkosti vašich úst. Ak sa cítite neprijemne, obráťte sa na svojho lekára.

NIE

Nepoužívajte príliš malú trubicu na retrakciu líc. Nebude vidieť všetky zuby.

Nepoužívajte príliš veľkú trubicu na retrakciu líc, môže byť bolestivé alebo spôsobiť ujmu.

3 / Umiestnite svoj smartfón do držiaka na telefón.



ÁNO

Držiak na telefón podržte tak, aby gravírovaná podložka čeluste smerovala k vám.

Otvorte čelusť držiaka stlačením tlačidla bočného otvárania a priložte zadnú časť telefónu (bez krytu alebo puzdra) k držiaku, aby bol blesk obrátený dozadu a šošovky zarovnané s okienkom.

Pevne zatlačte na čelusť, aby telefón upol na miesto, a uistite sa, že je pevne zaistený.

Upravte polohu okienka podržaním tlačidla ladenia a vertikálnym pohybom držiaka, kým nevidíte šošovky a blesk cez okienko.



NIE

Nevkladajte telefón hore nohami.





Objavte svoj ScanBox^{PRO}


Phone holder

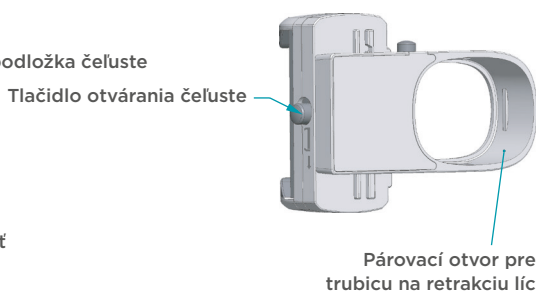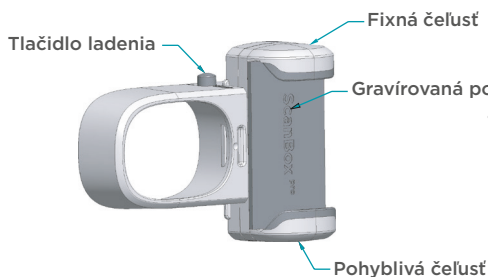


Cheek retractor tube

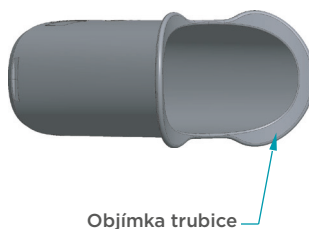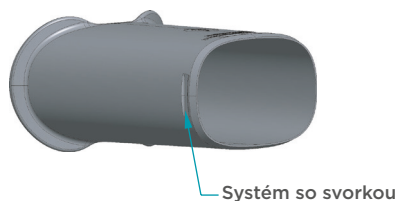

Pohľad spredu na váš ScanBox^{PRO} po spárovaní s vaším smartfónom.

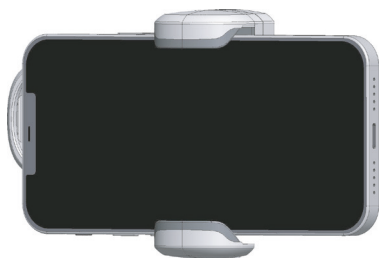

Pohľad zozadu na váš ScanBox^{PRO} po spárovaní s vaším smartfónom.

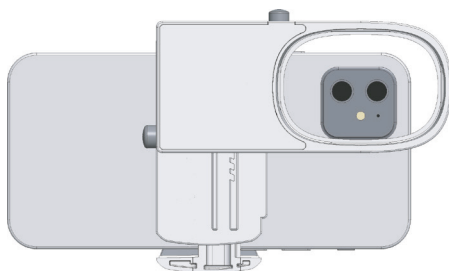



DentalMonitoring

dental-monitoring.com

Aplikácia DentalMonitoring je k dispozícii v App Store alebo Google Play.



DentalMonitoring je výrobok navrhnutý a vyrobený spoločnosťou Dental Monitoring SAS pod značkou DentalMind pre zdravotníckych pracovníkov (ZP). Používajú ho tiež pacienti pod povinným dohľadom zdravotníckeho pracovníka (ZP). DentalMonitoring je navrhnutý tak, aby pomáhal ZP registrovaným v DentalMind na diaľku monitorovať intraorálne situácie a ortodontické ošetrovanie. Výrobky DentalMonitoring sú registrované zdravotnícke pomôcky (iba v Európe) a sú označené značkou CE. Pred použitím sa obráťte na svojho ZP a/alebo použite návod na použitie. Dostupnosť výrobkov, vyhlásenia a regulačný stav sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od miestnych smerníc. Ďalšie informácie získate od miestneho zástupcu.